

COLDISEPT

HR



NANO SILVER

Sprej za nos



Medicinski proizvod u obliku spreja za nos uklanja osjećaj suhoće i iritacije nosne sluznice, te istovremeno štiti od štetnog djelovanja vanjskih čimbenika.

COLDISEPT nanoSILVER Sprej za nos osigurava dugotrajnu hidrataciju nosne sluznice, ublažava iritaciju te pospješuje regeneraciju nosne sluznice. Uklanja osjećaj peckanja.

Proizvod sadrži nanokoloidno srebro. Sprej za nos stvara zaštitni film na sluznici nosa čime ju štiti od djelovanja bakterija i virusa te pospješuje regeneraciju nosne sluznice.

Svojstva pripravka rezultat su djelovanja mineralnih soli i biljnih ekstrakata.

Pakiranje 20 ml

SASTAV

Pročišćena voda, nanokoloidno srebro, ekstrakt irske mahovine *Chondrus crispus*, sorbitol, glicerol, mineralne soli (kalijev dihidrogen fosfat, kalijev klorid, natrijev klorid, kalcijev klorid heksahidrat, magnezijev klorid heksahidrat), natrijev benzoat, limunska kiselina.

NAMJENA

Koristiti u svim slučajevima suhoće i iritacije sluznice nosa, bez obzira na uzrok.

Koristiti posebno u slučaju:

- atrofičnog rinitisa;
- infektivnog ili alergijskog rinitisa;
- uporabe lijekova koji oštećuju epitel nosne sluznice;
- sinusitisa;
- jakih onečišćenja ili prisutnosti prašine u zraku
- vrlo visoke ili vrlo niske temperature okoline
- osoba starije životne dobi
- duljeg boravka u prostorijama s centralnim grijanjem i / ili klima uređajem
- izloženosti duhanskom dimu (pušači).

NUSPOJAVE

Nuspojave COLDISEPT nanoSILVER Spreja za nos nisu zabilježene, međutim kod izuzetno osjetljivih osoba ne može se isključiti mogućnost pojave simptoma alergijske reakcije.

U slučaju pojave alergijske reakcije, odmah prestanite koristiti ovaj proizvod.

DODATNE INFORMACIJE I MJERE OPREZA

Nemojte koristiti proizvod ako ste alergični na neki od sastojaka.

Nemojte koristiti proizvod ako ste alergični na metalno srebro.

Spriječite slučajni kontakt s očima.

U slučaju pojave neželjenih reakcija prekinite s primjenom proizvoda.

Ne upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti!

Ukoliko se aplikator onečisti, uklonite ga, operite ga i prokuhajte ili isperite kipućom vodom. Trudnice i djeca mlađa od 6 godina mogu koristiti proizvod samo pod medicinskim nadzorom.

Proizvod se može koristiti dulje vrijeme bez rizika od pojave ovisnosti, nuspojava ili komplikacija.

Svaku neželjenu reakciju koja se povezuje s primjenom proizvoda treba prijaviti svojem liječniku ili ljekarniku.

UVJET ČUVANJA

Čuvati na temperaturi do 25 °C, na suhom mjestu, izvan dohвата djece.

NAČIN PRIMJENE I DOZIRANJE

Koristiti 3-4 puta na dan, prema individualnim potrebama.

1. Prije prve uporabe pritisnite raspršivač nekoliko puta.

2. Umetnite vrh raspršivača u nosnicu.

3. Pritiskom na raspršivač nanesite 1-2 doze u svaku nosnicu.

Grafički simboli:

	Broj serije		Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu.		Proizvođač
	Rok uporabe		Datum proizvodnje		Temperaturne granice

Datum zadnje revizije teksta upute: 01.09.2020

Proizvođač:
ARKONA Laboratorium Farmakologii
Stomatologicznej, Nasutów 99C,
21-025 Niemce, Poljska

Proizvedeno
u EU za:
Alpen Pharma AG,
Bern, Švicarska

